


روش اندازه گیری لاینرهای آپس

۶ سانتی متر بالاتر از انتهای دیستال، محیط استامپ را اندازه بگیرید.
برای انتخاب سایز لاینر، از جدول استفاده کنید.

به عنوان مثال: اگر محیط اندازه گیری شده ۳۰ سانتی متر باشد، یک لاینر با سایز ۲۸ انتخاب کنید.

محیط	سایز
16-19 cm	16
20-23 cm	20
24-25 cm	24
26-27 cm	26
28-31 cm	28
32-37 cm	32
38-43 cm	38
44-52 cm	44

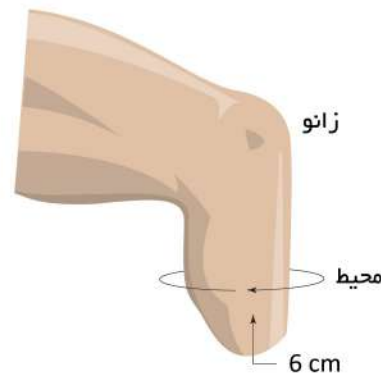

روش اندازه گیری اسلیوهای وگنر

۱۰ سانتی متر بالاتر و پایین تر از مرکز زانو، محیط پا را اندازه بگیرید.
برای انتخاب سایز اسلیو، از جدول استفاده کنید.

محیط بالای زانو	محیط زیر زانو	سایز
16-24 cm	10-17 cm	XS
23-34 cm	15-22 cm	S
29-43 cm	21-30 cm	M
33-47 cm	24-35 cm	MP
36-51 cm	28-42 cm	L
39-55 cm	31-46 cm	LP
42-60 cm	34-50 cm	XL
44-70 cm	36-55 cm	XXL
50-80 cm	40-60 cm	XXXL

